



# Книга за разговор



Изрежете тази част

Изрежете тази част

Изрежете тази част

система за невербална комуникация  
**[acent.re/speakbook](http://acent.re/speakbook)**

Speakbook 5th edition © 2011 Patrick Joyce, 2020 Ace Centre



# Книга за разговор


Книгата за разговор е средство за невербална комуникация за хора, които не могат да говорят и имат трудности да използват ръцете си, но могат да използват погледа си. Това издание е за хора, които могат да четат и пишат. За версии за хора, които не могат да четат, за версии на други езици или за джобни издания, посетете [acecent.re/speakbook](http://acecent.re/speakbook)

## Инструкции за употреба.

За да започнете, трябва да имате тази Книга за разговор, черен перманентен (изтриваем) маркер, кърпа за изтриване, събеседник.

Вие и събеседникът Ви стоите един срещу друг на разстояние около 1 метър. Ако се налага, може да увеличите или да намалите разстоянието. Книгата за разговор трябва да е отворена на страницата за упражнение, която е преди задната корица. Тя е предварително попълнена, за да може да разберете основната техника. Когато я усвоите, може да създадете собствени страници, използвайки празните страници. Книгата трябва да е сгъната и поставена между вас, така че и двамата да виждате "страница за упражнение" и да виждате очите си през отвор в средата. Виждате изборите на страницата и решавате кой от тях искате да предадете на събеседника. Когато решите, дайте знак на събеседника, че сте готов да започнете - напр. чрез поглеждане, мигане, поглеждане нагоре и надолу или нещо друго. След това погледнете съобщението, което е избрано, за около секунда, след което погледнете големия символ, който отговаря на малкия, който е отстрани до съобщението. Събеседникът проследява погледа Ви - напр. може да види, че поглеждате горе вляво и след това - към големия триъгълник. Така той разбира, че искате да кажете "Чаша чай!" и казва това на глас, а Вие потвърждавате с мигане или друг предварително уговорен знак.

Това е основната техника за използване на Книгата за разговор. Сега трябва да разберете как да използвате останалите страници в книгата, тъй като истинската сила на Книгата за разговор е в способността ѝ да дава достъп до стотици фрази по Ваш избор, фрази, които може да промените по всяко време, само с помощта на кърпа за изтриване и маркер.

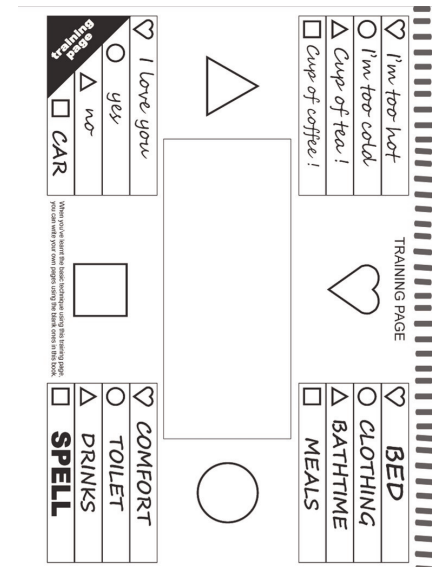

### Как да пишете в Книгата за разговор

Какво точно ще напишете в тази книга зависи от индивидуалните интереси и нужди. Но е важно на двете страници, които се виждат едновременно при отваряне на албума, да пише едни и същи неща и страниците да са огледални образи една на друга - както в примера отгоре. Двата със събеседника Ви говорите различни езици? Няма проблем - използвайте различен език на двете страници.

Инструкции





## Изрезете тази част


## Изрежете тази част

Книгата за разговор има място за 119 фрази. Ако това не е достатъчно или ако искате да има повече от 14 фрази в дадена секция, може да се изписват по 2 фрази във всяка кутийка - една с черен и една с червен маркер. Черната фраза се избира по обичайния начин, а червената фраза се избира чрез мигане докато се гледа към големия символ.


□	▷	○	♥

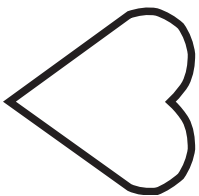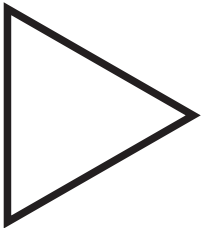

□	▷	○	♥

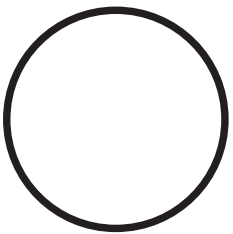

□	▷	○	♥


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


Начална страница

□	▷	○	♥


**БУКВИ**

♡
○
△
□

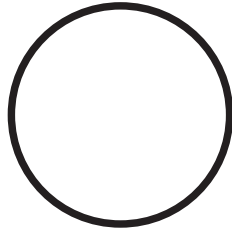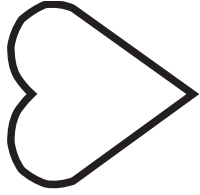

Изрежете тази част

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♡
○
△
БУКВИ □



Начална страница


Изрежете тази част















Изрежете тази част

НАЧАЛО

♡
○
△
□

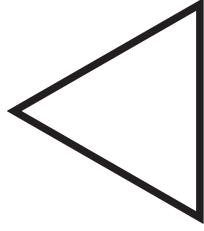

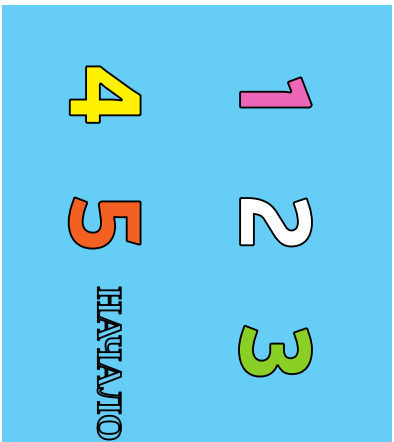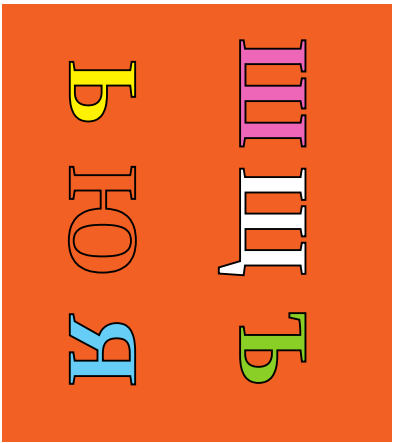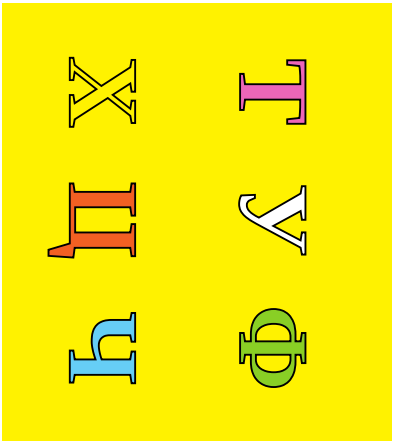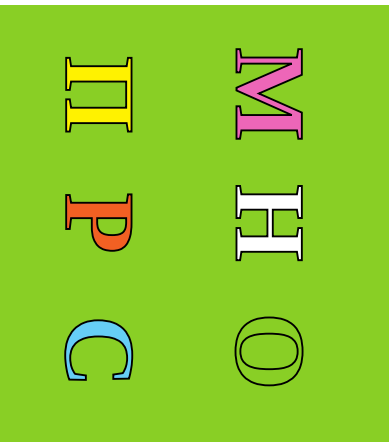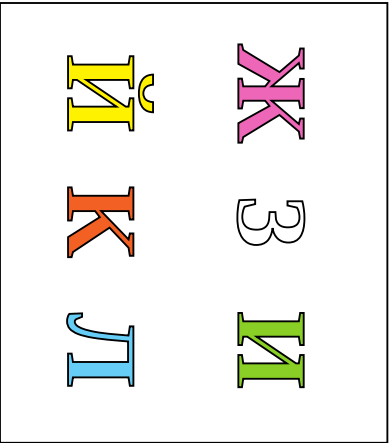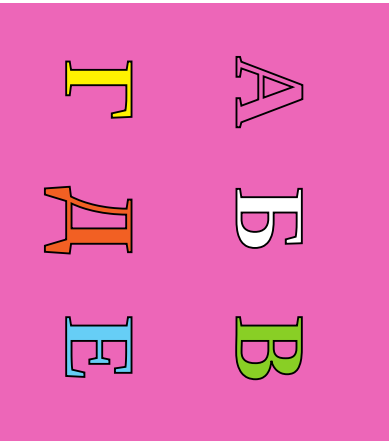

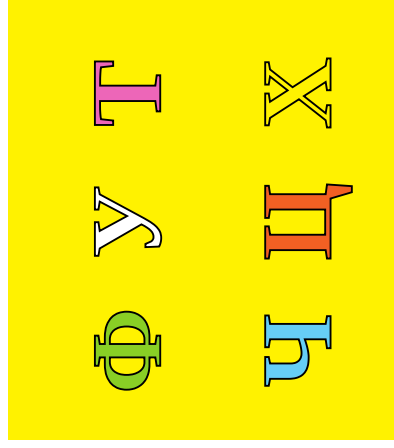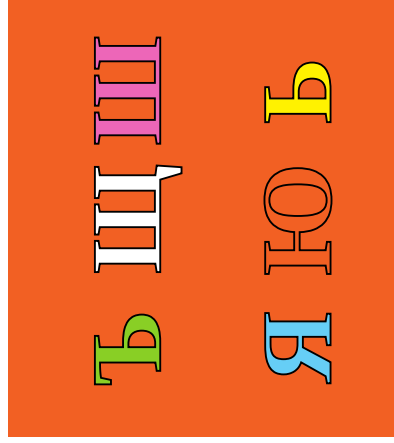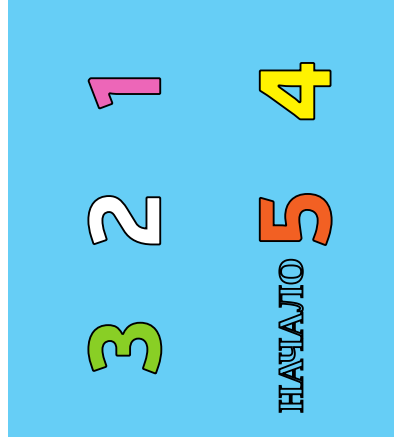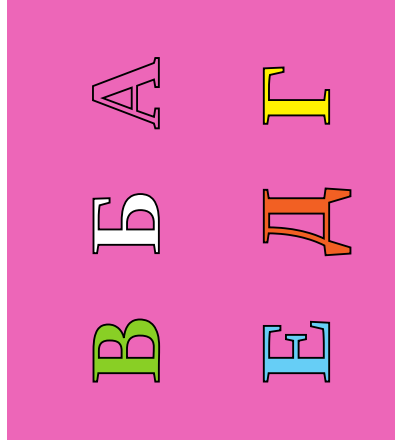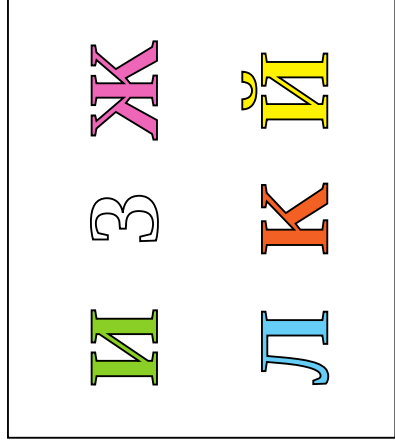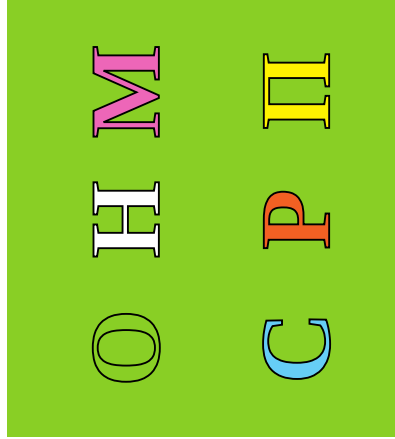


Изрежете тази част





Изрежете тази част




□	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

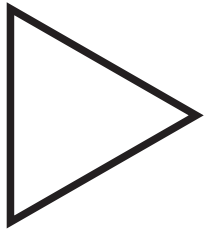

□	
△	
○	
♡	

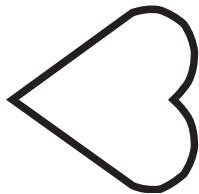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



□	БУКВИ
△	
○	
♡	

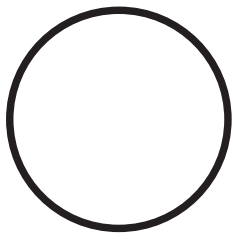

□	
△	
○	
♡	




♡	○	△	□

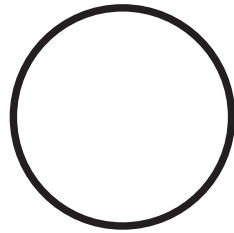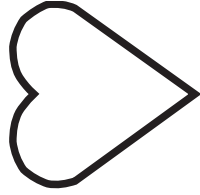

Изрежете тази част

♡	○	△	□

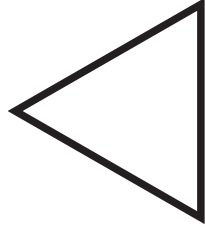

♡	○	△	□

БУКВИ

Изрежете тази част




♡	○	△	□



НАЧАЛО




□	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

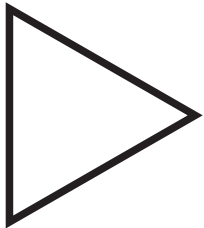

□	
△	
○	
♡	

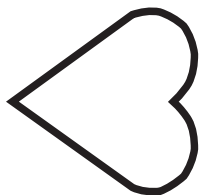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


□	БУКВИ
△	
○	
♡	

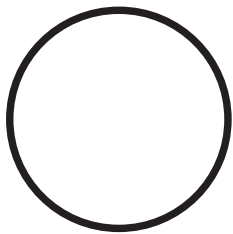


□	
△	
○	
♡	


♡
○
△
□

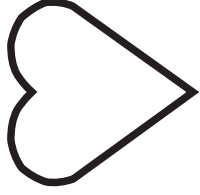

♡
○
△
□

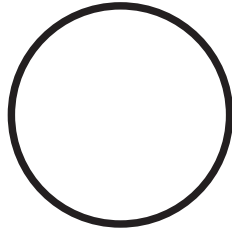


Изрежете тази част

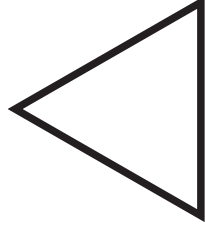

♡
○
△
□

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БУКВИ




♡
○
△
□

НАЧАЛО



Изрежете тази част




□	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

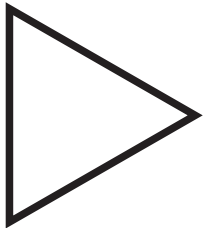

□	
△	
○	
♡	

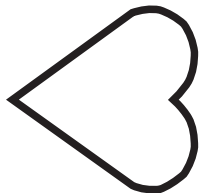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


□	БУКВИ
△	
○	
♡	


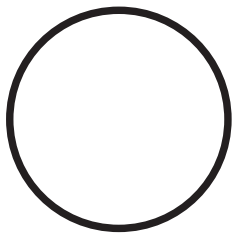


□	
△	
○	
♡	

♡	○	△	□

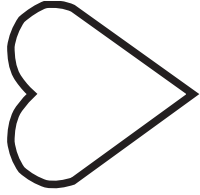

♡	○	△	□

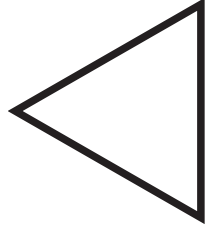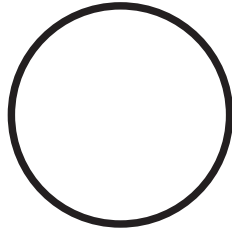

Изрежете тази част

♡	○	△	□

**БУКВИ**

♡	○	△	□

**НАЧАЛО**


Изрежете тази част





Изрежете тази част




□	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

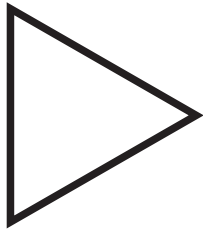

□	
△	
○	
♡	

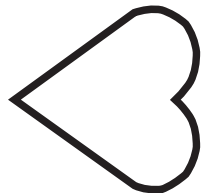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


□	БУКВИ
△	
○	
♡	

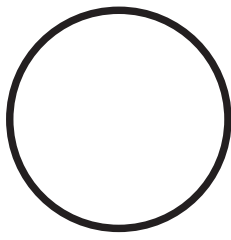

□	
△	
○	
♡	



♡	○	△	□

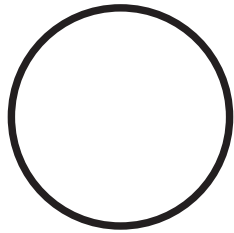

Изрежете тази част



♡	○	△	□

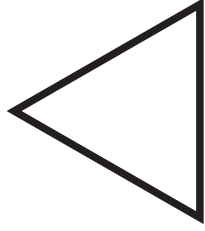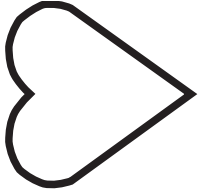

♡	○	△	□

**БУКВИ**

Изрежете тази част


♡	○	△	□

**НАЧАЛО**



Изрежете тази част




□	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

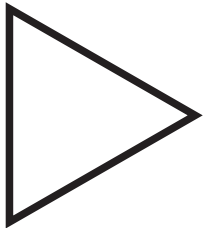

□	
△	
○	
♡	

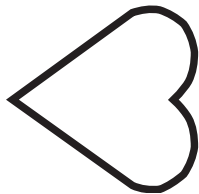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


□	БУКВИ
△	
○	
♡	

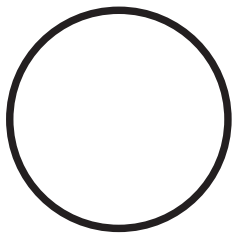

□	
△	
○	
♡	




♡	○	△	□

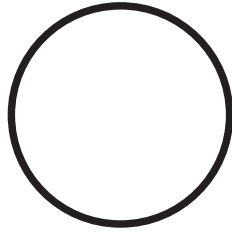

Изрежете тази част




♡	○	△	□

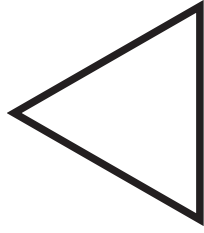

♡	○	△	□

БУКВИ

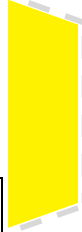


Изрежете тази част





♡	○	△	□

НАЧАЛО


□	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

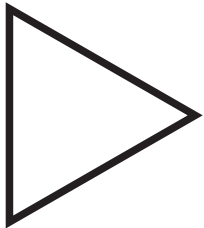

□	
△	
○	
♡	

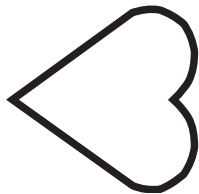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


□	БУКВИ
△	
○	
♡	

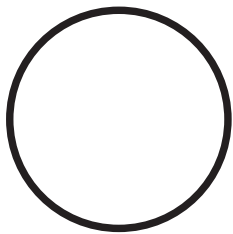

□	
△	
○	
♡	


♡	○	△	□

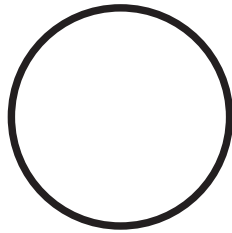

Изрежете тази част



♡	○	△	□

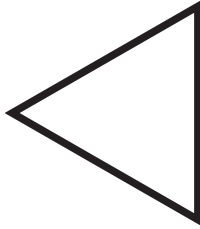

♡	○	△	□
БУКВИ			



БУКВИ




Изрежете тази част





♡	○	△	□
НАЧАЛО			


□	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

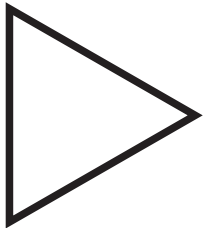

□	
△	
○	
♡	

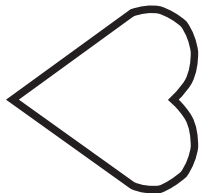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


□	БУКВИ
△	
○	
♡	

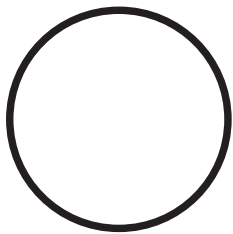

□	
△	
○	
♡	



♡	○	△	□

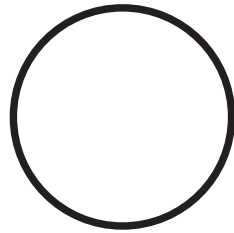

Изрежете тази част



♡	○	△	□

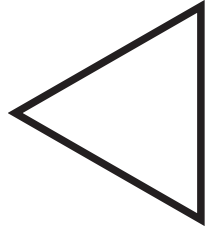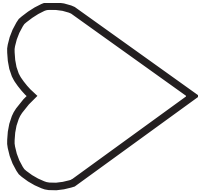

♡	○	△	□
<b>БУКВИ</b>			




Изрежете тази част





♡	○	△	□
<b>НАЧАЛО</b>			


□	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

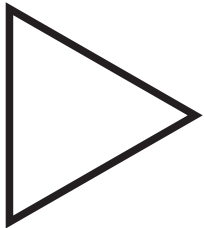

□	
△	
○	
♡	

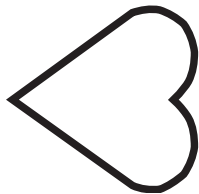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


□	БУКВИ
△	
○	
♡	

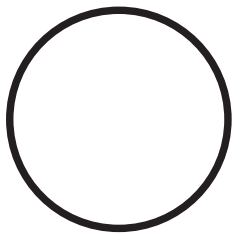

□	
△	
○	
♡	



♡	○	△	□

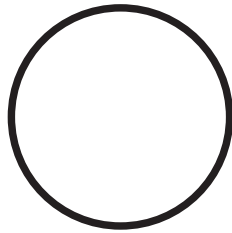

Изрежете тази част



♡	○	△	□

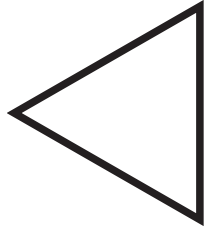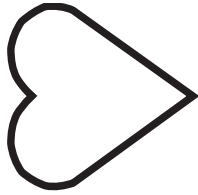

♡	○	△	□

**БУКВИ**







Изрежете тази част


♡	○	△	□





**НАЧАЛО**





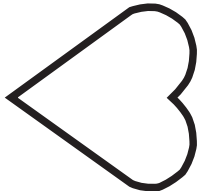



 Горещо ми е
 Студено ми е
 Чаша чай!
 Чаша кафе!


СТРАНИЦА ЗА УПРАЖНЕНИЕ

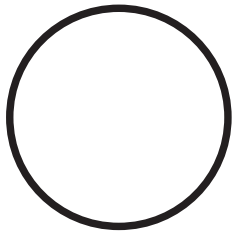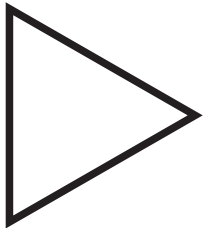





 ЛЕГЛО
 ДРЕХИ
 БАНЯ
 ХРАНА

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

 Обичам те
 да
 не
 КОЛА




След като с помощта на тази страница за упражнение усвоите техниката на използване, може да създадете собствени страници като използвате наличните празни страници.

 УДОБСТВО
 ТОАЛЕТ
 НАПИТКИ
 БУКВИ




ЛЕГЛО	♡
ДРЕХИ	○
БАНЯ	△
ХРАНА	□


СТРАНИЦА ЗА УПРАЖНЕНИЕ

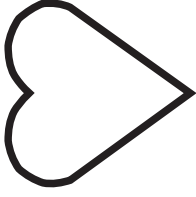

Горещо ми е	♡
Студено ми е	○
Чаша чай!	△
Чаша кафе!	□

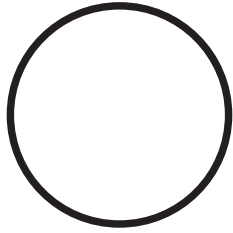

Изрежете тази част

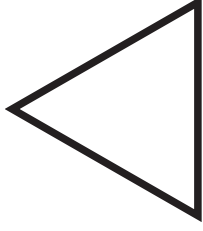

УДОБСТВО	♡
ТОАЛЕТ	○
НАПИТКИ	△
БУКВИ	□

След като с помощта на тази страница за упражнение усвоите техниката на използване, може да създадете собствени страници като използвате наличните празни страници.

Обичам те	♡
да	○
не	△
КОЛА	□



Изрежете тази част

Изрежете тази част

## Страница за изписване с пръсти.

Ако можете да посочвате с пръст, то тази страница е за вас. Като посочвате с пръст, можете да съставяте думи и фрази. Често използваните думи могат да бъдат записани в празните полета. Ако посочите към думата „НАЧАЛО“, това означава, че сега искате да общувате с поглеждане, използвайки основната книга.

лв.	€	%							
+	-	:					1	2	3
*	=	?					4	5	6
НАЧАЛО							7	8	9
БЛАГОДАРЯ							ДА	0	НЕ
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й
К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я