



Книга за разговор

Изрежете тази част

Изрежете тази част

Изрежете тази част

система за невербална комуникация
acent.re/speakbook

Speakbook 5th edition © 2011 Patrick Joyce, 2020 Ace Centre



Книга за разговор


Книгата за разговор е средство за невербална комуникация за хора, които не могат да говорят и имат трудности да използват ръцете си, но могат да използват погледа си. Това издание е за хора, които могат да четат и пишат. За версии за хора, които не могат да четат, за версии на други езици или за джобни издания, посетете acecent.re/speakbook

Инструкции за употреба.

За да започнете, трябва да имате тази Книга за разговор, черен перманентен (изтриваем) маркер, кърпа за изтриване, събеседник.

Вие и събеседникът Ви стоите един срещу друг на разстояние около 1 метър. Ако се налага, може да увеличите или да намалите разстоянието. Книгата за разговор трябва да е отворена на страницата за упражнение, която е преди задната корица. Тя е предварително попълнена, за да може да разберете основната техника. Когато я усвоите, може да създадете собствени страници, използвайки празните страници. Книгата трябва да е сгъната и поставена между вас, така че и двамата да виждате "страница за упражнение" и да виждате очите си през отвора в средата. Виждате изборите на страницата и решавате кой от тях искате да предадете на събеседника. Когато решите, дайте знак на събеседника, че сте готов да започнете - напр. чрез поглеждане, мигане, поглеждане нагоре и надолу или нещо друго. След това погледнете съобщението, което е избрано, за около секунда, след което погледнете големия символ, който отговаря на малкия, който е отстрани до съобщението. Събеседникът проследява погледа Ви - напр. може да види, че поглеждате горе вляво и след това - към големия триъгълник. Така той разбира, че искате да кажете "Чаша чай!" и казва това на глас, а Вие потвърждавате с мигане или друг предварително уговорен знак.


Това е основната техника за използване на Книгата за разговор. Сега трябва да разберете как да използвате останалите страници в книгата, тъй като истинската сила на Книгата за разговор е в способността ѝ да дава достъп до стотици фрази по Ваш избор, фрази, които може да промените по всяко време, само с помощта на кърпа за изтриване и маркер.

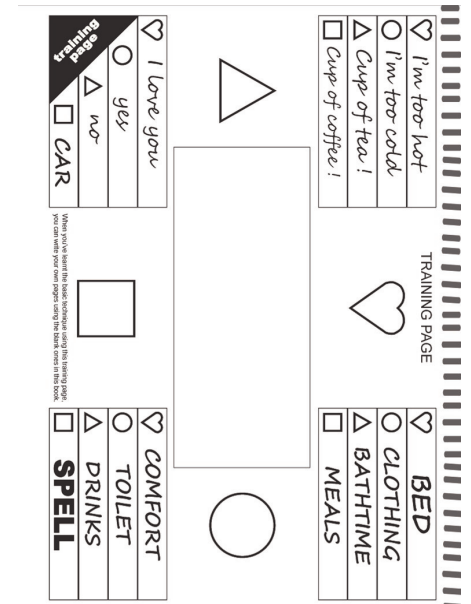

Как да пишете в Книгата за разговор

Какво точно ще напишете в тази книга зависи от индивидуалните интереси и нужди. Но е важно на двете страници, които се виждат едновременно при отваряне на албума, да пише едни и същи неща и страниците да са огледални образи една на друга - както в примера отгоре. Двамата със събеседника Ви говорите различни езици? Няма проблем - използвайте различен език на двете страници.

Всяка страница от Книгата за разговор има 14 или 15 празни полета, в които можете да се напише собствен текст. За да може да се сменят страниците, сме създали страница, наречена "НАЧАЛО". Тя се намира в началото на книгата и е обозначена с черен показалец "НАЧАЛО" в края на страницата. Идеята е да се напишат 7 най-често използвани фрази на тази страница, тъй като винаги започвате тук. Има и 8 празни полета, в които се изписват наименованията на остана лите 8 двойни страници. Това са области от живота, които изискват набор от фрази, напр. къпане или пътуване с кола. Отляво има пример за възможна начална страница. Осемте думи, изписани с главни букви, са връзки към двойни страници в тази книга. Трябва да намерите празна страница и да напишете например "СПАНЕ" върху показалеца отдолу, след което в празните полета се изписват 14-те най-важни фрази, свързани с навиците Ви преди лягане. Повтаряте това за останалите 7 връзки, докато книгата се запълни. Ако нещо е сгрешено или ако искате да промените някоя фраза, просто тя се изтрива и се изписва това, което искате.

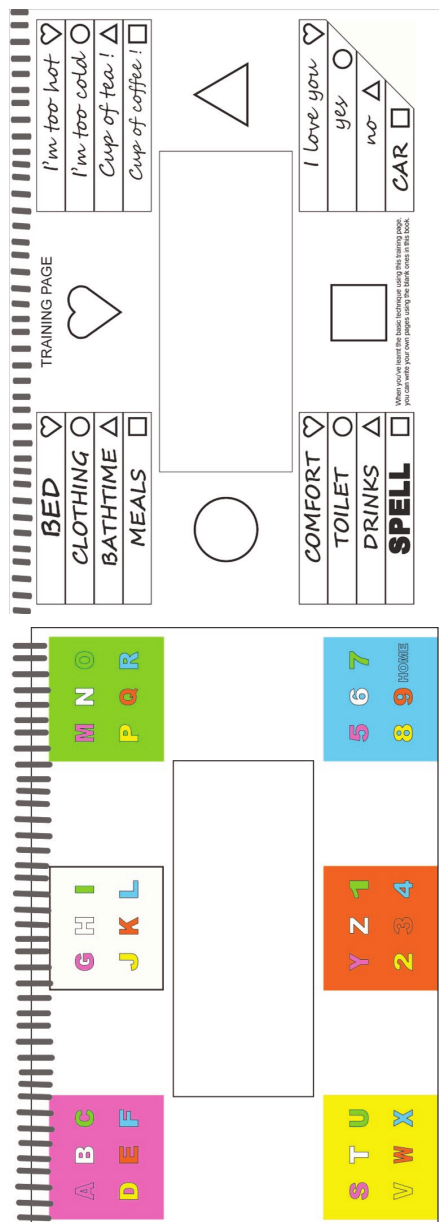

Изрежете тази част

За да използвате Книгата за разговор, давате знак на събеседника си, че искате да кажете нещо. Събеседникът Ви отваря Книгата за разговор на страницата "НАЧАЛО" и Вие избирате напр. "СПАНЕ". Събеседникът Ви отваря страницата "СПАНЕ" и Вие можете да кажете "Искам да спя" или нещо друго. Всяка страница има предварително отпечатани "НАЧАЛО" и "БУКВИ". С "НАЧАЛО" винаги може да се върнете на страница "НАЧАЛО" (Може да искате "Чаша чай!" в леглото).

На страницата "БУКВИ" може да съставите буква по буква думи и фрази, които не са в книгата. Тя се използва по същия начин като останалите страници, но има и една разлика. На тази страница има 6 цветни блока, всеки от тях е с 6 цветни букви или цифри. Тук е цялата азбука и някои цифри. Погледнете буквата, която искате да изберете, след това погледнете цветния блок със същия цвят като желаната буква. Партньорът следи погледа и вижда какво


избирате, например, горния ляв блок и след това горния десен блок (зелено) и разбира, че искате да изберете буквата "В". Събеседникът казва "В" на глас за потвърждение и Вие продължавате със следващата буква. Събеседникът може да отгатне останалата част от думата, за да става по-бързо.

Книгата за разговор има място за 119 фрази. Ако това не е достатъчно или ако искате да има повече от 14 фрази в дадена секция, може да се изписват по 2 фрази във всяка кутийка - една с черен и една с червен маркер. Черната фраза се избира по обичайния начин, а червената фраза се избира чрез мигане докато се гледа към големия символ.


Изрежете тази част

Изрежете тази част


□
▽
○
♡

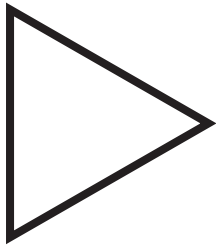

□
▷
○
♡

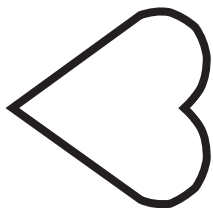


Начална страница

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



♡
○
▽
□

БУКВИ

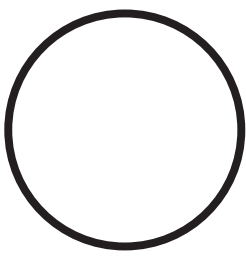


♡
○
▷
□

	♡
	○
	△
	□

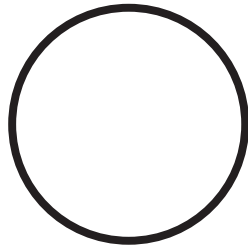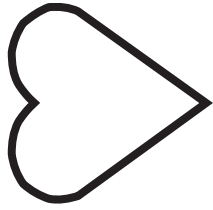


	♡
	○
	△
	□

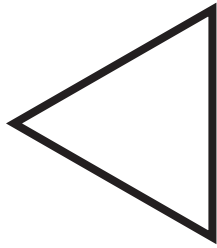

Изрежете тази част

	♡
	○
	△
БУКВИ	□

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

Начална страница

	♡
	○
	△
	□

Изрежете тази част



Изрежете тази част

НАЧАЛО

А Б В
Г Д Е

Ж З И
Й К Л

М Н О
П Р С

Т У Ф
Х Ц Ч

Ш Щ Ъ
Ы Ю Я

1 2 3
4 5 ИАЧЛАЛЮ

О Н М

С Р П

И З Ж

Л К Й

В Б А

Е Д Г

3 2 1

ИНАЧАЛНО 5 4

Ъ Щ Ш

Я Ю Ъ

Ф У Т

Ч Ц Х


Изрежете тази част

Изрежете тази част



Изрежете тази част

БУКВИ


□	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

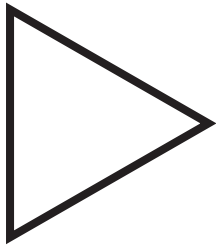

□	
△	
○	
♡	

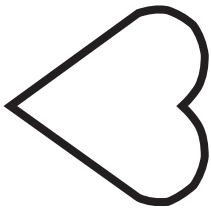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


□	БУКВИ
△	
○	
♡	


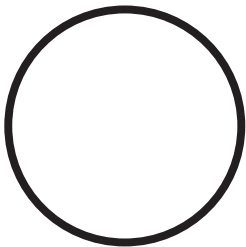


□	
△	
○	
♡	

♡
○
△
□

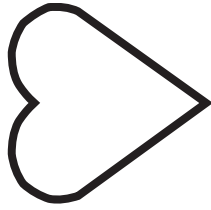


♡
○
△
□

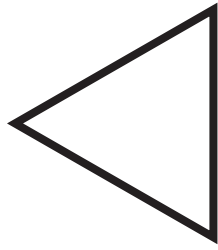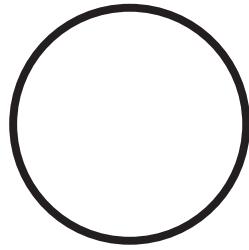

Изрежете тази част

♡
○
△
□

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БУКВИ




♡
○
△
□


НАЧАЛО





Изрежете тази част

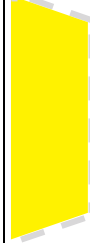


□	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

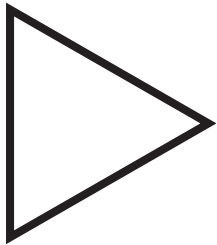

□	
△	
○	
♡	

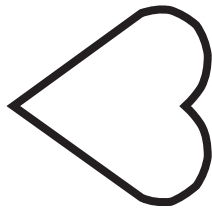
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


□	БУКВИ
△	
○	
♡	

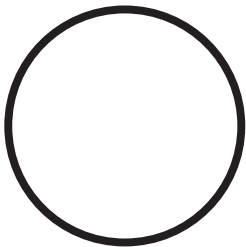


□	
△	
○	
♡	

♡	○	△	□

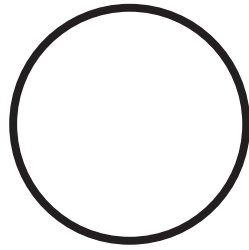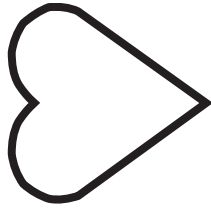

♡	○	△	□

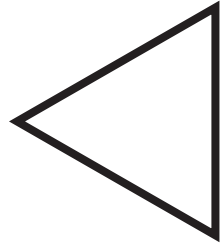


Изрежете тази част



♡	○	△	□

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БУКВИ




♡	○	△	□


НАЧАЛО





Изрежете тази част

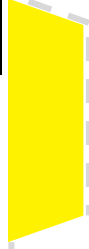


□	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

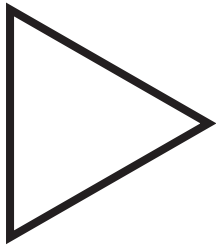

□	
△	
○	
♡	

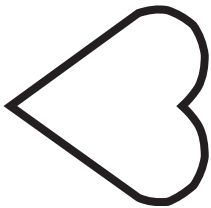
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


□	БУКВИ
△	
○	
♡	

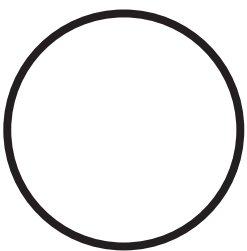


□	
△	
○	
♡	


	♡
	○
	△
	□

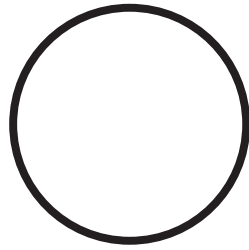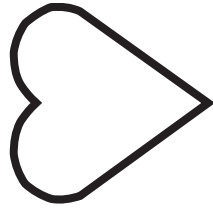

	♡
	○
	△
	□

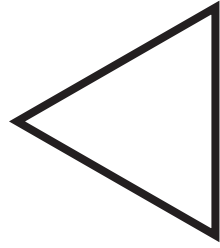

	♡
	○
	△
	□

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

	♡
	○
	△
	□

БУКВИ

НАЧАЛО




Изрежете тази част



Изрежете тази част




□	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

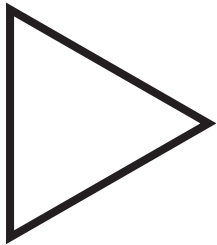

□	
△	
○	
♡	

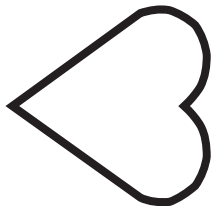
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


□	БУКВИ
△	
○	
♡	

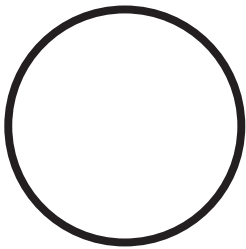


□	
△	
○	
♡	


	♥
	○
	△
	□

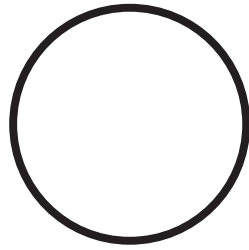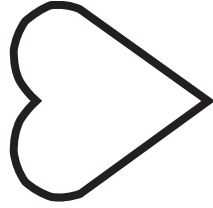

	♥
	○
	△
	□

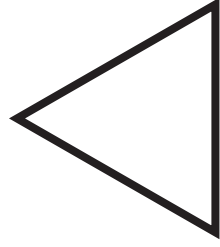

	♥
	○
	△
	□

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

	♥
	○
	△
	□

НАЧАЛО

БУКВИ




Изрежете тази част





Изрежете тази част




☐	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

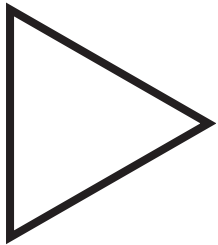

☐	
△	
○	
♡	

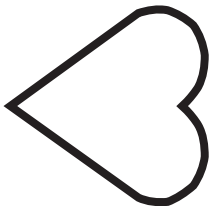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


☐	БУКВИ
△	
○	
♡	

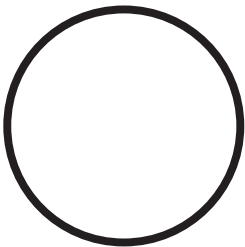


☐	
△	
○	
♡	


♡
○
△
□

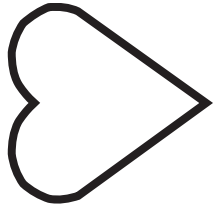

♡
○
△
□

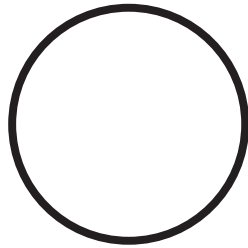


Изрежете тази част

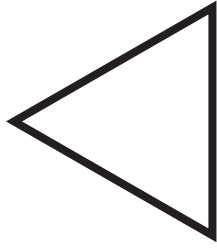

♡
○
△
□

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БУКВИ




♡
○
△
□


НАЧАЛО





Изрежете тази част

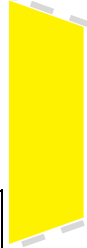


☐	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

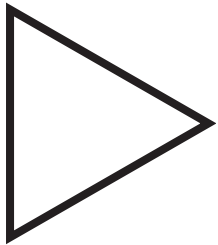

☐	
△	
○	
♡	

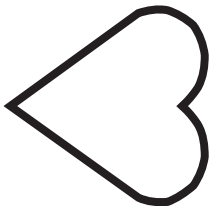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


☐	БУКВИ
△	
○	
♡	

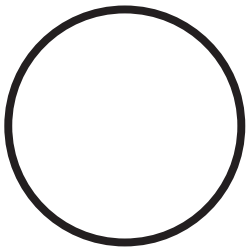


☐	
△	
○	
♡	


	♡
	○
	△
	□

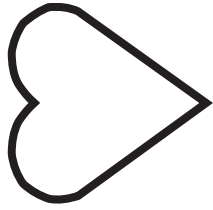

	♡
	○
	△
	□

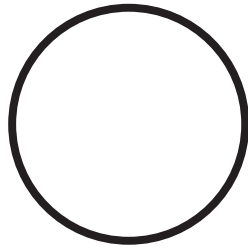


Изрежете тази част

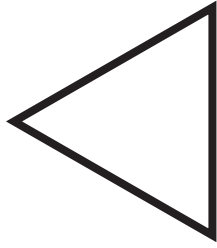

	♡
	○
	△
	□

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БУКВИ




	♡
	○
	△
	□

НАЧАЛО





Изрежете тази част


☐	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

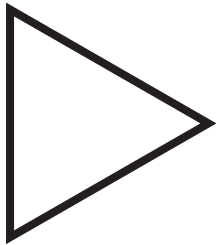

☐	
△	
○	
♡	

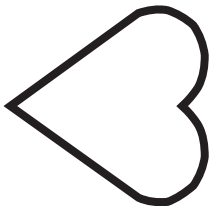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


☐	БУКВИ
△	
○	
♡	


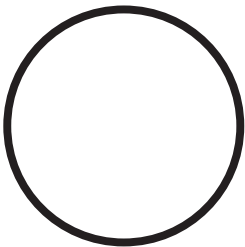


☐	
△	
○	
♡	

♡	○	△	□

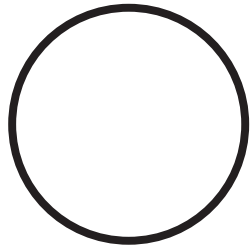

♡	○	△	□

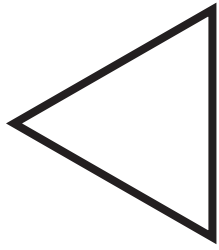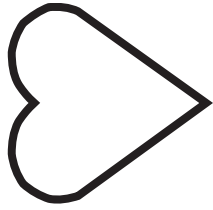

Изрежете тази част

♡	○	△	□

БУКВИ




♡	○	△	□


НАЧАЛО




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
Изрежете тази част




☐	НАЧАЛО
△	
○	
♡	

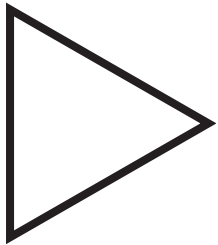

☐	
△	
○	
♡	

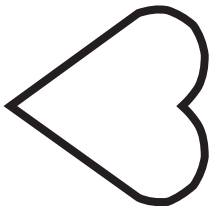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


☐	БУКВИ
△	
○	
♡	

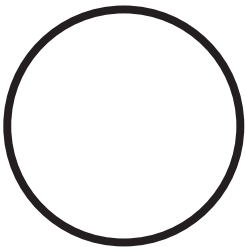


☐	
△	
○	
♡	


♡	○	△	□

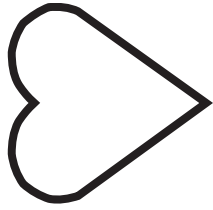


♡	○	△	□

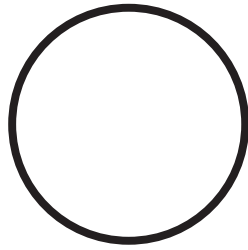

Изрежете тази част

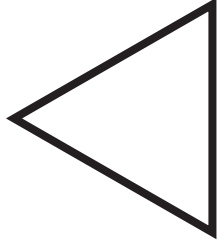



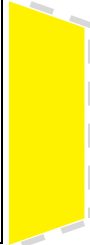

♡	○	△	□
БУКВИ			




♡	○	△	□
НАЧАЛО			









Изрежете тази част

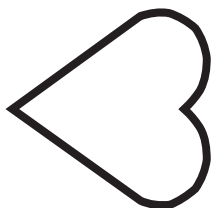



	Горещо ми е
	Студено ми е
	Чаша чай!
	Чаша кафе!


СТРАНИЦА ЗА УПРАЖНЕНИЕ

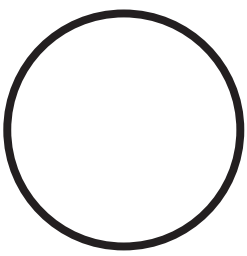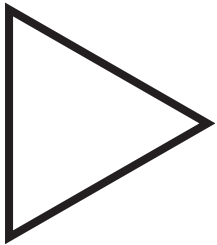





	ЛЕГЛО
	ДРЕХИ
	БАНЯ
	ХРАНА

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

	Обичам те
	Да
	не
	КОЛА



След като с помощта на тази страница за упражнение усвоите техниката на използване, може да създадете собствени страници като използвате наличните празни страници.




	УДОБСТВО
	ТОАЛЕТ
	НАПИТКИ
	БУКВИ

Страница за упражнение

ЛЕГЛО	♡
ДРЕХИ	○
БАНЯ	△
ХРАНА	□

Горещо ми е	♡
Студено ми е	○
Чаша чай!	△
Чаша кафе!	□

СТРАНИЦА ЗА УПРАЖНЕНИЕ

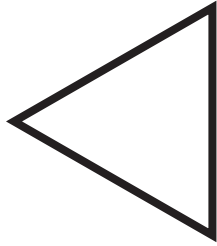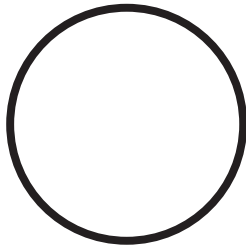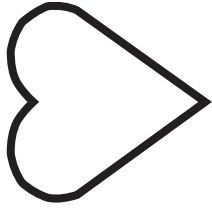

Изрежете тази част

УДОБСТВО	♡
ТОАЛЕТ	○
НАПИТКИ	△
БУКВИ	□

Обичам те	♡
да	○
не	△
КОЛА	□

След като с помощта на тази страница за упражнение усвоите техниката на използване, може да създадете собствени страници като използвате наличните празни страници.

Изрежете тази част

Изрежете тази част

Страница за изписване с пръсти.

Ако можете да посочвате с пръст, то тази страница е за вас. Като посочвате с пръст, можете да съставяте думи и фрази. Често използваните думи могат да бъдат записани в празните полета. Ако посочите към думата „НАЧАЛО“, това означава, че сега искате да общувате с поглеждане, използвайки основната книга.

лв.	€	%							
+	-	:					1	2	3
*	=	?					4	5	6
НАЧАЛО							7	8	9
БЛАГОДАРЯ							ДА	0	НЕ
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й
К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я